



OptraGate : mieux voir le champ opératoire

Cet écarteur de joues et de lèvres exempt de latex permet d'élargir efficacement et confortablement l'accès au champ endobuccal.



OÙ SE LE PROCURER ?



IVOCLAR VIVADENT

@ : info@ivoclarvivadent.fr

3w : ivoclarvivadent.fr



CV FLASH

Protocole réalisé par le

Dr Chakib TALEB

• Chirurgien-dentiste

L'écarteur souple sans latex *OptraGate* constitue une aide précieuse pour le chirurgien-dentiste et l'assistante dentaire. Cette solution pour une meilleure visibilité du champ opératoire est utile dans de nombreuses procédures : l'orthodontie, les traitements de restauration, la photographie, le laser, l'éclaircissement dentaire, le nettoyage professionnel des dents, l'imagerie dentaire (*empreintes optiques*), la prise d'empreinte, etc.

LES INDICATIONS :

L'isolation relative du champ opératoire à l'aide d'*OptraGate* est indiquée pour diverses procédures thérapeutiques, par exemple :

- *Le diagnostic : examen endobuccal des tissus mous et durs, photographie, prises d'empreintes (conventionnelles ou optiques).*
- *La prophylaxie : nettoyage dentaire professionnel (détartrage / polissage / surfaçage), orthodontie, fluoration et éclaircissement dentaire.*
- *La restauration : préparations cavitaires ou périphériques, restaurations directes et indirectes.*

LE MATÉRIAU

OptraGate est fait en Evoprène (*élastomère thermoplastique SEBS et polypropylène*), matériau hautement flexible garantissant un écartement homogène, indolore et confortable pour le patient,

et y compris pendant de longues périodes. Il est entièrement exempt de latex et peut donc être utilisé chez les patients allergiques.

LE CONDITIONNEMENT

Cet écarteur est disponible en trois tailles afin de s'adapter aux dimensions et aux amplitudes d'ouverture buccales des différents patients. La taille *Junior*, pour enfants, est appropriée pour les patients de 5 à 10 ans. Les deux tailles adultes, *Regular* et *Small*, sont prévues respectivement pour des bouches de grande et de petite tailles. Les tailles *Small* et *Junior* sont depuis peu disponibles en version colorée (*rose ou bleue*) pour une approche plus ludique chez les

enfants. Afin de faciliter et d'optimiser le choix de la taille d'*OptraGate* à utiliser, une échelle de mesure de la distance inter-commissurale est imprimée sur les nouveaux emballages. Il semble toutefois être intéressant de commander un assortiment de trois tailles (*OptraGate assortment*) pour commencer. Après quelques utilisations on peut opter, lors des commandes suivantes, pour les tailles les plus souvent utilisées. L'emballage individuel, très compact et à usage unique, permet un rangement facile et à portée de main. Le nouveau conditionnement *Starter Kit* peut se ranger dans un tiroir ou sur une étagère, tel un dévidoir, et permet ainsi une disponibilité et une distribution ergonomique des écarteurs.

Récapitulatif des différents conditionnements et leur contenu ; (Tab)

LE PROTOCOLE

La mise en place en bouche de l'écarteur souple se fait facilement et rapidement. Cependant le geste de mise en place peut nécessiter une légère courbe d'apprentissage.

Un QR-Code imprimé sur l'emballage donne accès à une vidéo en ligne illustrant avec précision la technique d'insertion en bouche. Certaines assistantes dentaires ont constaté que la mise en place s'avère parfois très facile en demandant simplement au patient de poser lui-même l'écarteur. Certains patients peuvent se plaindre d'une légère compression du frein médian (*maxillaire*

ou *mandibulaire*). Dans ce cas, il suffit d'interposer une compresse ou un rouleau de coton entre le frein et l'anneau de l'écarteur ; (Fig.1 à 6).

CHOIX DE LA TAILLE

Une échelle imprimée sur l'emballage permet de mesurer les dimensions propres à chaque patient et d'en déduire la taille appropriée ; (Fig.1).

ASTUCE

Afin de faciliter la mise en place en bouche du produit, il convient de le manipuler en pinçant l'anneau intra-buccal interne entre le pouce et l'index, de façon à réaliser une forme de « 8 », que l'on positionnera facilement contre les commissures labiales droite puis gauche. ■

1. Déterminer la distance entre les commissures en suivant la courbure labiale.



- Distance inter-commissurale ≤ 4,5 cm : Taille JUNIOR
- Distance inter-commissurale entre 4,5 et 6 cm : Taille SMALL
- Distance inter-commissurale ≥ 7 cm : Taille REGULAR

2. ... à l'aide du guide imprimé sur l'emballage.



3. ... puis, choisir la taille indiquée adaptée au patient.



Fig.2 : Une bouche décontractée favorise la mise en place.



Fig.3 : Insertion contre la commissure labiale droite.



Fig.4 : Insertion contre la commissure labiale gauche.



Fig.5 : Insertion derrière la lèvre supérieure.



Fig.6 : Insertion derrière la lèvre inférieure.

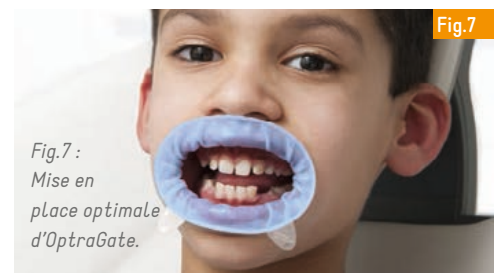


Fig.7 : Mise en place optimale d'OptraGate.

Conditionnement	Désignation	Conditionnement	Désignation
	OPTRAGATE ASSORTIMENT - Réf. 57727 • 40 OptraGate Regular Blanc • 40 OptraGate Small Blanc		OPTRAGATE STARTER KIT - Réf. 669087 • 4 OptraGate Small Rose • 4 OptraGate Small Bleu • 4 OptraGate Junior Rose • 4 OptraGate Junior Bleu
	OPTRAGATE REGULAR REFILL X 80 - Réf. 590850 • 80 OptraGate Regular Blanc		OPTRAGATE SMALL ASSORTIMENT - Réf. 669088 • 4 OptraGate Small Rose • 4 OptraGate Small Bleu
	OPTRAGATE SMALL REFILL X 80 - Réf. 590851 • 80 OptraGate Small Blanc		OPTRAGATE JUNIOR ASSORTIMENT - Réf. 669089 • 20 OptraGate Junior Rose • 20 OptraGate Junior Bleu
	OPTRAGATE JUNIOR REFILL X 80 - Réf. 591451 • 80 OptraGate Junior Blanc		